






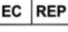






	HKU1	1,5 x 10 <sup>6</sup> TCID <sub>50</sub> / ml
Lidský etapneumovirus (hmpv) 3, typ B1	Peru2-2002	1,5 x 10 <sup>6</sup> TCID <sub>50</sub> / ml
Lidský metapneumovirus (hmpv) 16, typ A1	IA10-2003	1,5 x 10 <sup>6</sup> TCID <sub>50</sub> / ml
Virus paradržipky	Typ 1	7,5 x 10 <sup>6</sup> TCID <sub>50</sub> / ml
	Typ 2	4,5 x 10 <sup>6</sup> TCID <sub>50</sub> / ml
	Typ 3	1,0 x 10 <sup>6</sup> TCID <sub>50</sub> / ml
	Typ 4A	1,0 x 10 <sup>6</sup> TCID <sub>50</sub> / ml

#### Reakce rušivých látek

Při testování s použitím nového koronavirového (SARS-CoV-2) antigenního rychlého testovacího zařízení (sliny) nedošlo k žádným interferencím mezi reagenciemi zařízení a potenciálními interferenčními látkami uvedenými v tabulce níže, což by způsobilo falešně pozitivní nebo negativní výsledky pro SARS-CoV-2 antigen.

Látka	Koncentrace	Látka	Koncentrace
Mucin	100µg/mL	Kyselina acetylsalicylová	3,0 mM
Plná krev	5% (v/v)	Ibuprofen	2,5 mM
Biotin	100µg/mL	Mupirocin	10 mg/mL
Neosynefrin (fenylefrin)	5%(v/v)	Tobramycin	10µg/mL
Afrin nosní sprej (oxymetazolin)	5%(v/v)	Erytromycin	50µM
Solný nosní sprej	5%(v/v)	Ciprofloxacín	50µM
Homeopatie	5%(v/v)	Ceftriaxon	110mg/mL
Kromoglykát sodný	10 mg/mL	Meropenem	3,7µg/mL
Olopatadin hydrochlorid	10 mg/mL	Tobramycin	100µg/mL
Zanamivir	5 mg/mL	Histamin hydrochlorid	100µg/mL
Oseltamivir	10 mg/mL	Peramivir	1mmol/mL
Artemeter / lumefantrin	50µM	Flunisolid	100µg/mL
Doxycyklin hyklát	50µM	Budesonid	0,64nmol/ L
Chinin	150µM	fFutikazón	0,3ng/mL
Lamivudin	1 mg/mL	Lopinavir	6µg/mL
Ribavirin	1 mg/mL		Ritonavir
Daclatasvir	1 mg/mL	Abidor	1mmol/mL
Acetaminofen	150µM	Shromážděné nosní stěry u lidí	Neuvedeno

#### SYMBOL

Značka	Význam	Značka	Význam
	Diagnostická zdravotnický prostředek in vitro		Limit skladovací teploty
	Výrobce		Autorizovaný zástupce pro Evropské společenství
	Datum výroby		Datum spotřeby
	Nepoužívejte opakovaně		Přečtěte si návod k použití
	Kód šarže		Splňuje požadavky směrnice ES 98/79 / ES



**HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.**  
4. patro, budova # 12, Eastern Medicine Town,  
Ekonomický a technologický rozvoj Xiasha,  
310018 Chang-čou, Če-tiang, Čínská lidová republika  
Webové stránky: [www.realytech.com](http://www.realytech.com)



**Luxus Lebenswelt GmbH**  
Kochstr.1 47877, Willich, Německo



**FBF care s.r.o.**  
Školní 36, 562 04 Ústí nad Orlicí  
DIČ:09205993  
info@fbfcare.com  
www.fbfcare.com

Datum revize návodu: 13.5.2021



Číslo: 1100003207  
Verze: 2.1  
Datum účinnosti: 13. 5. 2021